

# Umgang mit einer Roger Anlage

## Roger Touchscreen Mic

On/Off	
Aufladen	
Voll aufgeladen	
Stumm	
Primary nicht verfügbar	



0 - 10 cm



## Roger Pass-around

	On/Off
	Aufladen
	Voll aufgeladen
	Stimme Übertragung
	Stumm
	Mikrofon Standby
	Primary nicht verfügbar

Tippen Sie auf **Verbinden**, um das Gerät zum Netzwerk hinzuzufügen

## Positionierung des Touchscreen Mic

- Das Touchscreen Mic wird so um den Hals gehängt, dass das Display sichtbar ist. Die Länge der Schlaufe sollte so eingestellt sein, dass das Touchscreen Mic frei im Brustraum hängt.
- Keine Schals oder lange Ketten verwenden, diese führen zu Störgeräuschen oder Dämpfungen.

## Touchscreen Mic in Gruppenarbeiten

- Während Gruppenarbeiten hängt das Touchscreen Mic um den Hals und bleibt stumm geschaltet. Die Handmikrofone können weiterhin benutzt werden.
- Wird das Touchscreen Mic abgelegt, dann werden auch die Handmikrofone deaktiviert.

## Do's & Don'ts

### Sprechen mit dem Handmikrofon

- Beim Sprechen immer das Handmikrofon verwenden. Dieses ruhig und nah an den Mund halten (ca. 5 – 10 cm). Der **grüne Ring** zeigt, wenn das Mikrofon das Gesprochene aufnimmt. Dies funktioniert automatisch.
- Eine laute Stimme ersetzt das Handmikrofon nicht. Nur über das Handmikrofon wird das Gesprochene an die Hörtechnik übertragen.

### Hinlegen des Handmikrofons

- Nach dem Sprechen sollte das Mikrofon vorsichtig auf den Tisch gelegt werden. Das Mikrofon schaltet sich automatisch stumm, was an dem **rot blinkenden Kreis** erkennbar ist.
- Beim Rollen erzeugt das Handmikrofon Störgeräusche.